

Fitodenta hidrogelis su joduotu povidonu (PVP-I)

Klinikinio panaudojimo protokolas odontologams

Šis dokumentas skirtas odontologams kaip praktinės gairės Fitodenta hidrogelio su joduotu povidonu (PVP-I) naudojimui po odontologinių procedūrų, siekiant užtikrinti tinkamą žaizdų antiseptiką, higieną ir pooperacinę priežiūrą.

1. Produkto aprašymas

Fitodenta hidrogelis su joduotu povidonu (PVP-I) yra lokaliai naudojamas antiseptinis hidrogelis, skirtas pooperacinei žaizdų priežiūrai, dezinfekcijai ir antiseptiniam poveikiui.

Produktas sujungia joduoto povidono antiseptines savybes su hialurono rūgštimi, kuri padeda palaikyti drėgmės balansą ir komfortą audiniuose.

2. Indikacijos

- Po danties šalinimo (alveolės antiseptika)
- Po chirurginių procedūrų burnos ertmėje (implantacija, minkštųjų audinių operacijos)
- Esant žaizdoms ar gleivinės pažeidimams burnos ertmėje
- Kai reikalinga papildoma vietinė antiseptinė priežiūra

3. Naudojimo rekomendacijos

- Baigus procedūrą, švelniai aplikuoti nedidelį kiekį hidrogelio tiesiai į žaizdos ar operuotą sritį.
- Rekomenduojama aplikaciją kartoti 2–3 kartus per dieną pirmosiomis dienomis po procedūros.
- Naudojimo trukmė koreguojama pagal klinikinę situaciją ir gijimo eigą.

4. Veikimo ypatybės

- Joduotas povidonas pasižymi plataus spektro antiseptiniu poveikiu prieš bakterijas, virusus ir grybus.
- Hialurono rūgštis padeda palaikyti tinkamą drėgmės balansą ir komfortą gijimo metu.

5. Saugumo informacija

- Skirta tik lokaliajam naudojimui burnos ertmėje.
- Vengti kontakto su akimis.
- Nenaudoti pacientams, alergiškiems jodui ar kitoms sudedamosioms dalims.
- Jei pasireiškia nepageidaujamos reakcijos, nutraukti naudojimą.

6. Integravimas į gydymo planą

- Gali būti taikomas kaip papildoma antiseptinė priemonė po odontologinių procedūrų.
- Padeda palaikyti švarią žaizdos aplinką gijimo laikotarpiu.

Pastaba: Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui odontologijos praktikoje.